

SMARTSTRIPS[®]

Date : 30/11/2018
Version : 2.2


CRYPTOSPORIDIUM - BIO K 403

(BOÎTE DE 10 DISPOSITIFS)

BANDETTES POUR LA DÉTECTION SEMI-QUANTITATIVE DU CRYPTOSPORIDIUM DANS LES MATIÈRES FÉCALES



Précautions d'utilisation

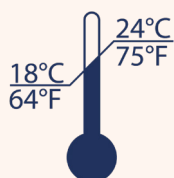

Tous les constituants doivent être ramenés à 21°C +/- 3°C avant utilisation.



Porter des **gants** lors de la réalisation du test.



La **précision** du test dépend en grande partie des étapes de prélèvement.



Éliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.



L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une **cuillère rase**.



Le kit doit être conservé à **température ambiante** dans un **endroit sec**. Une fois que le dispositif est retiré de l'enveloppe, sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.

RÉALISATION DU TEST

1



■ Prélever les matières fécales au niveau du rectum. Si la selle est liquide, prélever une cuillère rase.

2



■ Si la consistance de la selle est solide, éliminer l'excédent à l'aide d'une spatule ou d'un objet propre.

3



■ Diluer le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon.
Bien homogénéiser en évitant la formation de mousse.

4



■ Déchirer l'enveloppe en aluminium en vous aidant de l'entaille.

6



■ Lire le dispositif SmartStrips™ à l'aide de l'application SmartStrips™ App de votre smartphone.

5



■ Introduire un dispositif dans le liquide.
■ Attendre **10±1 minutes** et interpréter **immédiatement** le résultat en utilisant l'application SmartStrips™ App*.



Négatif

+(+++)
++(++)
+++(+)
++++



Négatif

++ ++ ++ ++
+++ ++ ++ ++
++++ ++ ++ ++
++++ ++ ++ ++

Négatif

Légèrement positif
Positif
Très positif
Fortement positif

* A propos de SmartStrips™ App

Vous trouverez le manuel d'utilisation rapide dans le kit. Un manuel d'utilisation détaillé est également disponible sur notre site internet : www.biox.com



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2015
certified to assure the best to its customers