

SMARTSTRIPS

Date : 30/11/2018
Version : 1.1

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS - BIO K 402

(BOÎTE DE 10 DISPOSITIFS)

BANDETTES POUR LA QUANTIFICATION DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS



Précautions d'utilisation



Tous les constituants doivent être ramenés à 21°C +/- 3°C avant utilisation.



Le kit doit être conservé à **température ambiante** dans un **endroit sec**. Une fois que le dispositif est retiré de l'enveloppe, sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.



La **précision** du dosage dépend en grande partie des étapes de prélèvement.



Porter des **gants** lors de la réalisation du test.



L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une **cuillère rase**.



Éliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.

RÉALISATION DU TEST



■ Prélevez les matières fécales au niveau du rectum. Prélevez-en une **cuillère rase** en enlevant l'excédent à l'aide d'une spatule.



■ Diluez le prélèvement dans le liquide contenu dans le flacon.

Bien homogénéiser en évitant la formation de mousse.



■ Introduire un dispositif dans le liquide.

■ Attendre **10±1 minutes** et interpréter **immédiatement** le résultat en utilisant l'application SmartStrips™App*.



■ Lire le dispositif SmartStrips™ à l'aide de l'application SmartStrips™ App de votre smartphone.

* A propos de SmartStrips™ App

Vous trouverez le manuel d'utilisation rapide dans le kit. Un manuel d'utilisation détaillé est également disponible sur notre site internet : www.biox.com



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2015
certified to assure the best to its customers