



Notice d'utilisation
ADC50EPC-TAYL_NO_(FR)_V02
09/2024

Adia^X Control

Extraction Positive Control CEMO TAYLORELLA

Référence : ADC50EPC

Témoin positif en *Taylorella equigenitalis* & *Taylorella asinigenitalis* pour contrôle d'extraction

Usage in vitro et strictement vétérinaire



Composition du kit

Matériel fourni		Kit ADC50EPC 100 réactions
EPC TAY	Témoin Positif d'Extraction CEMO TAYLORELLA	1 flacon lyophilisé (A réhydrater)
NF-Water	Eau Nucléase free	1 x 1 mL tube (Réactif prêt à l'emploi)

Kit(s) PCR associé(s)

Kit(s) associé(s)	Référence(s)
ADIAVET™ CEMO TAYLORELLA REAL TIME	ADI501-100

Historique de révision

Date	Version	Modifications
03/2023	V01	Création
09/2024	V02	Modification du tube de NF-Water de 500 µL à 1 mL.

Note : les modifications mineures concernant la typographie, la grammaire et la mise en forme ne sont pas incluses dans l'historique des révisions.

A. Introduction

Préalablement à la mise en place « en routine » d'une méthode de diagnostic moléculaire dûment caractérisée et validée, le laboratoire doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre l'essai concerné en vérifiant qu'il obtienne les performances annoncées par le fabricant et/ou le Laboratoire de référence. Il s'agit de la confirmation des performances ou adoption de méthode. Ces vérifications sont effectuées à l'aide de contrôles fournis par le fabricant et/ou le Laboratoire national de référence. Le niveau d'infection de ce contrôle est fixé entre 1 et 10 fois la limite de détection de la méthode. Lors des essais en routine, un témoin positif cible d'extraction (parfois nommé sentinelle) est introduit dans chaque série d'extraction afin de valider les étapes analytiques. Le niveau d'infection de ce contrôle est fixé entre 1 et 100 fois la limite de détection de la méthode.

B. Principe du test

Le témoin « EPC TAY » est un mélange de cultures virales inactivées et lyophilisée de *Taylorella equigenitalis* et *Taylorella asinigenitalis*. Il est calibré entre 10 et 100 x LD_{MÉTHODE} après remise en suspension. Ce témoin permet de confirmer les performances de la méthode et de valider les étapes analytiques lors des essais en routine avec les kits PCR Bio-X Diagnostics associés.

C. Conditions de stockage

A réception, stocker le kit à +2/8 °C et au sec. Les réactifs reconstitués doivent être aliquotés et stockés à une température inférieure à -15 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Stocker à l'abri de la lumière. Ne pas décongeler plus de 3 fois.

D. Matériel supplémentaire et réactifs requis non fournis

- Thermocycleur avec son consommable pour PCR Temps réel.
- Appareil d'homogénéisation pour tubes.
- Pipettes de 1 - 10 µL, 20 - 200 µL et 200 - 1000 µL.
- Embouts Nucléase-free avec filtres pour micropipettes.
- Microtubes Nucléase-free de 1,5 mL et 2 mL.
- Gants latex ou nitrile non poudrés.
- Eau Nucléase-free.
- Kit PCR associé.
- Kit d'extraction d'acides nucléiques (Billes magnétiques ADIAMAG ou colonnes de silice) ou lyse directe.
- Matrice exempte de *T. equigenitalis* et *T. asinigenitalis*.

E. Précautions d'utilisation et de sécurité

- Pour usage vétérinaire *in vitro* uniquement.
- Pour usage animal uniquement.
- Pour usage professionnel uniquement.
- Lire l'ensemble du protocole avant de commencer et le respecter scrupuleusement.
- Ne pas utiliser les réactifs après la date de péremption du kit.
- Ne pas utiliser les réactifs dont l'emballage est détérioré.
- Ne pas mélanger des réactifs de différents lots.
- Ne pas ouvrir les tubes PCR après amplification.
- Éliminer le matériel utilisé en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.
- Ce coffret contient des composants d'origine animale. La maîtrise de l'origine et/ou de l'état sanitaire des animaux ne pouvant garantir de façon absolue que ces produits ne contiennent aucun agent pathogène transmissible, il est recommandé de les manipuler avec les précautions d'usage relatives aux produits potentiellement infectieux (ne pas ingérer ; ne pas inhaler).

F. Mode opératoire

1. Reconstitution du témoin

- Ajouter **500 µL** de « **NF Water** » dans le flacon « **EPC TAY** ».
- Homogénéiser le flacon à l'aide d'un agitateur de type vortex > 20 secondes.
- Après reconstitution, le témoin est calibré entre **10 et 100 X LD_{MÉTHODE}**.
- Aliquoter et stocker la solution à < -20 °C jusqu'à la date de péremption du kit. Ne pas décongeler plus de 3 fois.

2. Confirmation des performances – Adoption de méthode - LD_{MÉTHODE}

a. Extraction

Ajouter **5 µL** de « **EPC TAY** » à **995 µL** de suspension d'écouvillon exempte de *Taylorella equigenitalis* et *Taylorella asinigenitalis* puis extraire **en duplicata** selon le protocole utilisé. Deux séances indépendantes doivent être réalisées (cf U47-600-1). Il est recommandé de réaliser au moins un témoin négatif d'extraction par séance afin de vérifier l'absence de contamination.

b. Amplification

Les acides nucléiques extraits sont amplifiés avec le(s) kit(s) PCR Bio-X Diagnostics associé(s) et selon leur(s) notice(s) d'utilisation.

c. Validation des résultats

Les 4 résultats obtenus avec le « **EPC TAY** » doivent être positifs pour la cible recherchée.

3. Validation des étapes analytiques – Sentinelle

a. Extraction

Ajouter **5 µL** de « **EPC TAY** » à la prise d'essai de la matrice exempte de *T. equigenitalis* et *T. asinigenitalis* puis extraire selon le protocole utilisé.

b. Amplification

Les acides nucléiques extraits sont amplifiés avec le(s) kit(s) PCR Bio-X Diagnostics associé(s) et selon leur(s) notice(s) d'utilisation.

c. Validation des résultats

L'ensemble des résultats obtenus avec le « **EPC TAY** » permettent de constituer la carte de contrôle du processus analytique.

Références bibliographiques

- U47-600-1 : Méthodes d'analyse en santé animale - PCR (réaction de polymérisation en chaîne) - Partie 1 : exigences et recommandations pour la mise en œuvre de la PCR en santé animale.

Table des symboles

Symbole	Signification
	Référence du catalogue
	Fabricant
	Limite supérieure de température
	Utiliser jusque
	Code du lot
	Consulter les instructions d'utilisation
	Contenu suffisant pour "n" tests
	Pour usage vétérinaire <i>in vitro</i> uniquement – Pour usage animal uniquement
	Conserver à l'abri de la lumière