

Adia^X

Prep

Dispositif pour la préparation d'échantillons de fèces

- La préparation d'échantillons la plus simple pour ADIAVET™ PARATB REAL TIME
- Seulement 1 dispositif
- Gain de temps (4X plus rapide)
- 6 éléments remplacés par 1 élément

1 élément



Dispositif de préparation d'échantillons tout-en-un comprenant :

- ✓ Sans pesée
- ✓ Sans pipetage
- ✓ Sans colmatage

Facile à utiliser pour analyser un grand nombre d'échantillons dans le cadre de la surveillance des troupeaux

Nouvelle procédure pour faciliter la préparation des échantillons



Préparation d'échantillon la plus **rapide** du marché :

- Seulement 1 cuillère
- Tampon inclus (30 mL)



Préparation d'échantillon la plus **précise** du marché :


- Grande quantité de fèces (4,5 g)



Préparation d'échantillon la plus **pratique** du marché :

- Filtre haut empêchant le colmatage
- Bouchon à vis évitant les éclaboussures lors de la fermeture
- Tube de 50 mL de diamètre standard : transport facile pour 24 séries, maintenu sur un support standard
- Étanche pendant le transport

Plus facile : pré-traitement de 96 échantillons en 1h avec ADIAPREP™

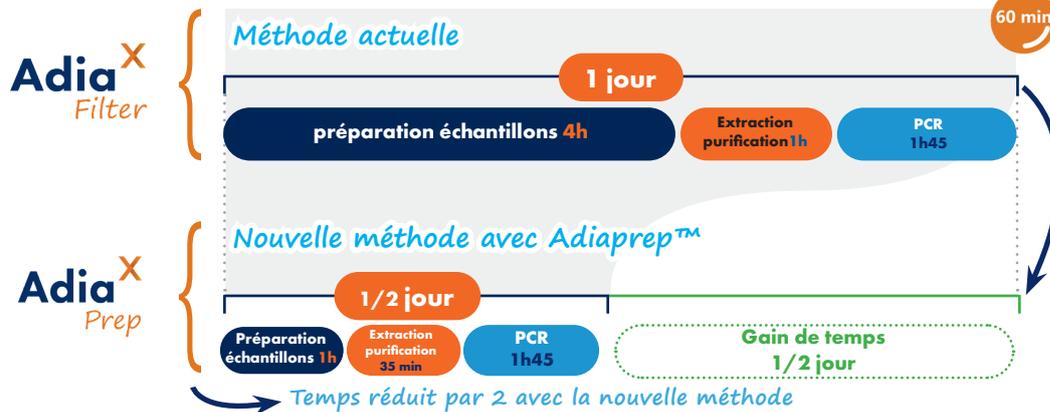

1 Echantillonner




2 Mélanger



3 Distribuer



Préparation d'échantillons avec ADIAPREP™

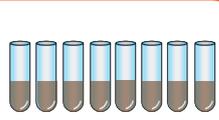

5 min 3000 g



Remettre en suspension le culot

5 min - 30 Hz



5 min 3000 g



21 min



PCR

Contact us

✉ support.pcr@biox.com

☎ +33 02 96 68 40 20

🌐 www.biox.com